

## **SMERNICA FOOD PRINT® UPRAVUIJÚCA PODMIENKY NAKLADANIA S KRVOU**

### **I. Všeobecné zásady**

1. Nakoľko krv predstavuje biologický materiál, na správne fungovanie testu FOOD PRINT® je nevyhnutné pridržiavať sa tejto smernice upravujúcej podmienky nakladania s krvou.
2. Je potrebné si uvedomiť, že pre vykonanie testu FOOD PRINT™ postačuje odobrať malé množstvo krvi, tzv. „pár kvapiek“ (ďalej ako „krvná vzorka“).
3. Je potrebné aby odobratá krvná vzorka pochádzala priamo od testovanej osoby a aby bola v súlade s touto smernicou bezodkladne odoslaná na testovanie.
4. Na manipuláciu s krvnou vzorkou a jej odoslanie do testovacieho laboratória používajte výhradne zdravotnícke materiály dodané spoločnosťou SEPEA, s.r.o.

### **II. Manipulácia s krvou**

1. Krv ako biologický materiál podlieha vplyvom času a fyzikálnych faktorov rýchlym zmenám. Pre ich minimalizovanie preto, prosíme, dodržiavajte nasledujúce lehoty na jej odoslanie v závislosti od predpokladanej vonkajšej teploty:

| Vonkajšia teplota | Deň 1 | Deň 3 | Deň 7 | Deň 14 |
|-------------------|-------|-------|-------|--------|
| 2-8 °C            | OK    | OK    | OK    | OK     |
| do 23 °C          | OK    | OK    | OK    | -      |
| do 37 °C          | OK    | -     | -     | -      |
| do 45 °C          | OK    | -     | -     | -      |

2. Predávajúci nezodpovedá/neručí za správnosť výsledkov testovania, pokiaľ nebola krvná vzorka zo strany Kupujúceho alebo doručovateľa správne skladovaná resp. neboli dodržané teplotné parametre uvedené v tabuľke.

### **III. Odosielanie krvi**

1. Odobratá krvná vzorka určená na testovanie sa odosiela v prepravnej nádobe (skúmavke) doručenej v testovacej sade za dodržania doby uvedenej v čl. II. bod. 1.
2. Prepravnú skúmavku je potrebné starostlivo uzavrieť priložených uzáverom.
3. Prepravnú skúmavku je možné uložiť priamo do plastového prepravného boxu, v ktorom bola testovacia sada doručená kupujúceho. Okolie prepravnej skúmavky odporúčame vyplniť tak, aby sa zabránilo voľnému pohybu skúmavky vo vnútri plastového prepravného boxu (napr. prostredníctvom dokumentov, ktoré sa posielajú spoločne s krvnou vzorkou, alebo inými mäkkými materiálmi). Na doručovanie prepravnej skúmavky je potrebné použiť také obálky, ktoré zabránia akémukoľvek prípadnému úniku krvnej vzorky do vonkajšieho prostredia. Je vhodné použiť obálky ktoré majú bublinkovú vnútro.
4. Na doručovanie krvnej vzorky, prosím, používajte ako doručovateľov Slovenskú poštu alebo iného doručovateľa (UPS, DHL a podobne).
5. Zásielka obsahujúca prepravnú skúmavku s krvnou vzorkou by mala byť označená kosoštvorcovou značkou:



a na vonkajšom obale musí byť aspoň 6 mm vysokými písmenami uvedené prepravné označenie „Biological substance, category B“ (Biologická látka, kategória B). Vonkajšia obálka s týmto označením je obsahom testovacej sady a Kupujúci je povinný ju pri zasielaní krvnej vzorky použiť.

6. Z doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty sú vylúčené poštové zásielky, ktorých obsah alebo úprava môže ohroziť život alebo zdravie ľudí, poškodiť životné prostredie. Za obsah zásielky a jej zabalenie zodpovedá Kupujúci. Spoločnosť SEPEA, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie povinností súvisiacich so zasielaním krvnej vzorky
7. V zmysle zákona o poštových službách odosielať zodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu zatajením vylúčených zásielky zdoručovania.
8. Odosielať rovnako zodpovedá za dodržiavanie ostatných právnych predpisov týkajúcich sa biologických materiálov
9. Táto smernica je platná a účinná od | dňa 25.5.2018